

醫療氣體系統保養

雙月服務，半年服務，以上醫療氣喉管系統保養，需要機電署通知客戶及承辦商，確實日期可以進行。

年度服務 (需要停氣)，需要機電署預約客戶及承辦商一致開會，經過會議後、三方面通過確實進行日期。客戶要求 當日支援手提氧氣樽數量及醫療真空泵 (手提) 數量。當日開工前拜訪各樓層客戶(洗樓),簽工作許可證(permit to work)確保三方面知道及確保醫院(病房)正常運作。



雙月服務

- 1) 檢查所有按住/固定螺栓。
- 2) 檢查所有缸外部損傷和生鏽。(VIE 缸)
- 3) 檢查管道是否有損壞和洩漏。(肥皂水)
- 4) 檢查管路開關閥及不回閥是否損壞和洩漏。 ie.Valve box. (肥皂水)
- 5) 檢查調節器是否損壞，洩漏和結霜。
- 6) 檢查所有洩壓閥/安全閥排氣，以確保它是沒有障礙物。檢查是 否有洩漏。
- 7) 檢查所有爆破片，以確保它是沒有障礙 物。檢查是否有洩 漏。(VIE 缸)
- 8) 檢查所有的壓力和內容壓力表損壞，滲漏鑑定。
- 9) 檢查蒸發器是否損壞或不可接受的磨損，滲漏和異常結霜。(VIE)
- 10) 測試控制面板指示燈。



每半年服務

- 1) 檢查所有按住/固定螺栓。
- 2) 檢查所有缸外部損傷和生鏽。(VIE 缸)
- 3) 檢查噴漆條件。(必要時)
- 4) 檢查管道是否有損壞和洩漏。
- 5) 檢查管道保溫(如有)。
- 6) 檢查管路開關閥及不回閥是否損壞和洩漏。ie.Valve box.
- 7) 更換閥座的進氣閥每 6 個月。
- 8) 檢查調節器是否損壞，洩漏和結霜。
- 9) 檢查所有洩壓閥/安全閥排氣，以確保它是沒有障礙物。檢查是否有洩漏。
- 10) 檢查服務時間已 5 年更換洩壓閥/安全閥。
- 11) 檢查所有爆破片，以確保它是沒有障礙物/檢查是否有洩漏。
- 12) 檢查服務時間已 3 年更換爆破片。
- 13) 檢查所有的壓力和內容壓力表損壞，滲漏和鑑定。
- 14) 檢查蒸發器是否損壞或不可接受的磨損，滲漏和異常結霜。(VIE 缸)
- 15) 測試控制面板燈。
- 16) 檢查控制面板上的信號對中央警報面板(如有)。

年度服務

- 1) 檢查所有按住/固定螺栓。
- 2) 檢查所有缸外部損傷和生鏽。(VIE 缸)
- 3) 檢查噴漆條件(必要時)
- 4) 檢查管道是否有損壞和洩漏。
- 5) 檢查管道保溫(如有)。
- 6) 檢查管路開關閥及不回閥是否損壞和洩漏。ie.Valve box.
- 7) 更換閥座的進氣閥每 6 個月。
- 8) 檢查調節器是否損壞，滲漏和結霜。
- 9) 檢查所有洩壓閥/安全閥排氣，以確保它 是沒有障礙物。檢查是否有洩漏。
- 10) 檢查服務時間已 5 年更換洩壓閥/安全閥。
- 11) 檢查所有爆破片，以確保它是沒有障礙 物。檢查是否有洩漏。
- 12) 檢查服務時間已 3 年更換爆破片。
- 13) 檢查所有的壓力和內容壓力表損壞，滲漏和鑑定。
- 14) 檢查蒸發器是否損壞或不可接受的磨損，滲漏和異常 結霜。(VIE 缸)如結霜過量會導致喉管損毀,所以要定時淋 水，減低喉管損毀風險。
- 15) 檢查遙測，校準每 12 個月。(VIE 缸)
- 16) 檢查控制面板是否有任何損壞和線路完整性;燈測試 。
- 17) 檢查控制面板上的信號對中央警報面板(如有)。
- 18) 檢查所有信號功能如適用及可行的，如測試頂部填充 /底部灌裝閥信號。

(VIE Tank)

